

Prontosan® Solución



Descripción

Prontosan® Solución es una solución estéril de Polihexanida y undecilnamidopropil betaina para la irrigación de heridas.

Indicaciones

- Lavado, descontaminación y mantenimiento de las condiciones óptimas para la correcta cicatrización
- Indicado en casos de heridas agudas y quemaduras de grado uno y dos
- Eliminación de malos olores.

Ventajas

- Buena tolerancia cutánea
- Aplicación indolora
- No existe absorción
- Sin riesgo de citotoxicidad
- No reseca la piel ni membranas mucosas
- Elevada capacidad tensoactiva
- Excelente capacidad "detergente"

Uso del Prontosan® Solución

Directamente desde el envase de irrigación. Aplicación mediante gasas o tómulas estériles saturadas con **Prontosan®**. Humedeciendo gasas y dejando sobre la lesión 10-15 min. En el caso de fistulas profundas puede ser aplicado mediante jeringa.

Información de pedido Prontosan® Solución

Tamaño	Unidades/caja	Referencia
350 ml	10	400403
40 ml	6	400412

Descripción

Prontosan® Gel es una solución de Polihexanida y undecilenamidopropil betaina especialmente indicado ante la sospecha de colonización crítica o infección.

Indicaciones

- Lavado, descontaminación y mantenimiento de las condiciones óptimas para la correcta cicatrización.

Uso del Prontosan® Gel

Cubrir el lecho de la lesión con una fina capa de 3-5 mm dejando actuar hasta el siguiente cambio de apósito.

Información de pedido Prontosan® Gel

Tamaño	Unidades/caja	Referencia
30 ml	20	400505



Ventajas

- Aplicación indolora
- Excelente tolerancia cutánea: No existen alergias conocidas ni riesgo de absorción
- Máxima eficacia descontaminante (biofilms bacterianos)
- no interfiere en el proceso de granulación
- Proporciona las óptimas condiciones para el proceso de cicatrización