

# Silla de ruedas Mass Plus

## Modelo: G-909B-46 INT II



|       |    |    |      |    |      |    |    |     |    |     |            |  |
|-------|----|----|------|----|------|----|----|-----|----|-----|------------|--|
|       |    |    |      |    |      |    |    |     |    |     |            |  |
| 105.5 | 65 | 95 | 26.5 | 46 | 40.6 | 44 | 50 | 120 | 8" | 24" | 85x28x97.5 |  |

### Descripción

Silla de ruedas multifuncional adaptable y ajustable que brinda un soporte integral a usuarios que requieran asistencia en movilidad y/o desplazamiento. Cuenta con diferentes configuraciones para una personalización efectiva.

## A) Especificaciones técnicas

Silla de ruedas versátil, robusta y liviana (peso 19.5 kg.) Incluye tapiz de tela Oxford (con sistema antinflama), pintura electroestática al polvo, apoya brazos bi-direccionales que permiten una mejor transferencia del usuario y/o paciente de hasta 120 kg.



### Estructura y cruceta

Acero de alta resistencia con dos crucetas, el tubo de crucetas es de 25,4 mm



### Apoya brazos

Abatibles, plegable, desmontable y rebajado para aproximación a mesas. Con espuma de soporte y protección lateral



### Tapiz de asiento

Lona sintética tejida acolchada impermeable y antitranspirante, desmontable con broches cubiertos. Ancho 46 cm. Fondo 40.6 cm.



### Respaldo

Incluye bolsillo porta objetos/herramientas y franja reflectante



### Frenos

Bi laterales y ajustables horizontalmente



### Bastones de empuje

Bastones fijos para empuje con manillas ergonómicas de plástico de alta densidad antideslizantes



### Sistema de ajustes

Sistema ajustable en dirección horizontal y vertical en diversas posiciones



### Pieza en "H"



### Plegado

Incluye mecanismo de plegado fácil y rápido, reduciendo espacio de almacenamiento



### Seguridad

Protector de pantorrillas para evitar deslizamientos hacia atrás



### Apoya piernas

Apoya piernas ajustable en 6 posiciones con sistema botón click abatible y desmontable



### Set de herramientas

Para configurar partes personalizadas, ajuste de altura de horquilla, ruedas traseras y tapiz



### Horquillas de Aluminio

Posee 3 regulaciones de altura



**Ruedas delanteras**  
ABS maciza de goma  
de 8" (20cm)  
pulgadas  
**ancho de rueda**  
**2.54 cm**



**Ruedas traseras**  
Llanta de 24" de PU  
maciza de alta  
resistencia



**Aro de propulsión**  
Incorpora aro de  
autopropulsión



**Sistema de liberación**  
Ruedas traseras con  
sistema de liberación  
rápida/ quick release




**Cinturón de seguridad**  
Cinturón de seguridad  
pelvico desmontable



**Antivuelcos**  
Desmontables  
y ajustables



**Sistema de Guía**  
Para un plegado fácil  
y seguro

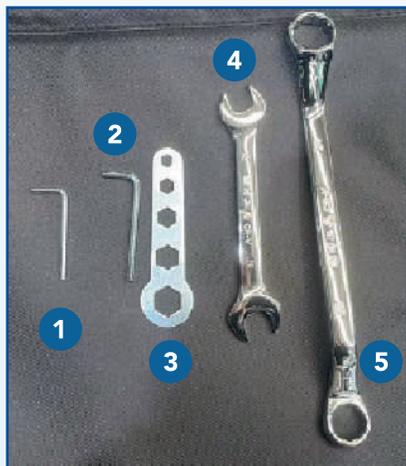

## Set de Herramientas



- Se utiliza llave Allen de 4 mm **1** y llave **3** para la parte de fijación de la rueda trasera como en la imagen



- Se utiliza llave Allen de 5 mm **2** en la rueda delantera como en la imagen



- Se utilizan dos llaves **4** y **5** para el apriete de las ruedas traseras

## B) Mantenimiento y cuidado

Se sugiere revisar su silla de ruedas cada 6 meses. Puede elizar la mantención solo o con ayuda de otras personas:

- Quite el polvo de todas las superficies y mecanismos
- Aceite el mecanismo de las palancas de freno, elementos móviles de enclavamiento
- Revise que todas las uniones atornilladas estén fijas
- Revise el estado y ajuste de las ruedas

## C) Precauciones

- No deje la silla de ruedas bajo la luz solar o cerca de fuentes de calor como estufas chimeneas u otros.
- Utilice solo un paño húmedo para la limpieza de su silla. No utilice productos abrasivos, revise periódicamente las ruedas y frenos, con el fin de evitar accidentes.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- Esta silla no puede apilarse. Respete el peso máximo establecido
- **La personalización en la configuración de este producto debe ser realizada por un médico o profesional de la salud tratante**

## D) Garantía

Nuestra Silla de Ruedas Estándar cuenta con una garantía de 5 años y cubre todas las fallas y defectos que se demuestre que son atribuibles a una fabricación defectuosa. La garantía no cubre el desgaste por el uso normal, las consecuencias de un manejo inadecuado o daños, mantenimiento deficiente y puesta en marcha o montaje incorrecto por parte del comprador o de un tercero o fallas atribuibles a circunstancias ajenas a nuestro control. Las piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía. La garantía se anulará si se realizan modificaciones en el producto que no estén autorizadas y no las efectúe el distribuidor especialista o se utilicen accesorios o recambios inadecuados. La garantía no cubre los costos derivados de la subsanación de defectos, como los gastos de transporte y desplazamiento, costos laborales, etc.





## E) Vida Útil

La vida útil prevista es de 5 años, siempre y cuando el producto se utilice diariamente y conforme a las instrucciones de seguridad y las instrucciones de mantenimiento, y se respete el uso previsto, tal y como se indica en el presente documento.

## F) Marca

Mass by Global Healthcare

## G) País de Origen

China

|  | <b>Packaging</b>    |
|---|---------------------|
|   | Alto : 85 cm        |
|   | Ancho : 28 cm       |
|   | Largo : 97.5 cm     |
|   | Peso total: 21.5 kg |
|   | Empaque :1 unidad   |