



Número de artículo 1000025240

## Pañales, Delta Slip, L3, Delta

- ✓ Lámina trasera tipo textil: comodidad y transpirabilidad
- ✓ Tecnología de núcleo eficiente para una rápida absorción
- ✓ Elásticos curvados en las piernas para un ajuste óptimo
- ✓ Barreras antifugas para una mayor protección
- ✓ Indicador de humedad
- ✓ Sistema de control de olores



## Descripción del producto

Delta Slip es nuestra gama de pañales para proteger la vejiga para incontinencia moderada a intensa. Los pañales anatómicos ofrecen un ajuste óptimo con elásticos curvados en las piernas para una mayor comodidad. Todos los productos están equipados con barreras antifugas para mayor protección y el sistema antiolor minimiza los olores desagradables. Las cintas combinadas garantizan un ajuste óptimo y un fácil reposicionamiento.



## Specifications

|                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de base                            | Pañales                                                                                                                                                           |
| Marca                                     | Delta                                                                                                                                                             |
| Submarca                                  | Slip                                                                                                                                                              |
| Tamaño                                    | L3                                                                                                                                                                |
| Material                                  | Cintas combi, celulosa ECF, PE, lámina posterior textil transpirable (BTBS), elastano, material no tejido, PP, resina, SAP                                        |
| Ingredientes / Composición                | Fibra de celulosa ECF, elastano, cinta combinada, no tejido, PE, PP, resina, SAP, lámina posterior similar al textil transpirable (BTBS) blanca                   |
| Longitud/profundidad                      | 970 mm                                                                                                                                                            |
| Anchura                                   | 800 mm                                                                                                                                                            |
| Tamaño de la cadera                       | 100-150 cm                                                                                                                                                        |
| Peso, neto                                | 133 g                                                                                                                                                             |
| Tolerancia                                | +/- 10%                                                                                                                                                           |
| Absorción Rothwell                        | 3200 ml                                                                                                                                                           |
| Género                                    | Unisex                                                                                                                                                            |
| Nivel de calidad                          | Delta                                                                                                                                                             |
| Certificaciones                           | CE, MD, UKCA.                                                                                                                                                     |
| Clase CE                                  | Class I                                                                                                                                                           |
| Estándares de producto o prueba           | ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001                                                                                                                                  |
| Directivas, normativas y leyes            | MDR (EU) 2017/745                                                                                                                                                 |
| Instrucciones de seguridad y advertencias | Manténgalo fuera del alcance de los niños.                                                                                                                        |
| Vida útil                                 | 5 años                                                                                                                                                            |
| Instrucciones de eliminación del producto | Puede eliminarse con los residuos domésticos normales clasificados según las normativas locales o, si es posible, en su localidad mediante compostaje industrial. |
| Instrucciones de eliminación de embalaje  | Puede reciclarse o incinerarse.                                                                                                                                   |

Instrucciones de uso/aplicación

Pañales para proteger la vejiga en casos de incontinencia moderada a intensa. Reconocimiento de tamaños de productos por nombres y sistema de numeración. Es importante medir siempre la circunferencia de la cadera para seleccionar la talla adecuada y elegir el nivel de absorción correcto para evitar fugas. Pliegue el pañal en sentido longitudinal con la lámina exterior hacia fuera para que adquiera su forma cóncava. Pase el pañal entre las piernas de delante hacia atrás. Tire del pañal horizontalmente por delante y por detrás. Dele forma de pantalón con perneras. Asegúrese de que encaje bien en la zona de la ingle. Fije las cintas inferiores en ángulo ligeramente hacia arriba en ambos lados y luego fije las cintas superiores en ángulo hacia abajo para un ajuste seguro y cómodo.

Packaging data

| Unidad | Contiene | Longitud | Anchura | Altura  | EAN           |
|--------|----------|----------|---------|---------|---------------|
| caja   | 4 paq    | 61.6 cm  | 39.6 cm | 36.7 cm | 5703538501722 |
| paq    | 22 ud    | 37 cm    | 18 cm   | 31 cm   | 5703538501715 |



El Reglamento (UE) 2017/745 es un reglamento de la Unión Europea sobre la investigación clínica y venta de productos sanitarios para uso humano. Deroga la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios, y la Directiva 90/385/CEE, relativa a los productos sanitarios implantables activos, con fecha del 26 de mayo de 2021.



El mercado CE garantiza el uso seguro de un producto y que este cumple con todas las precauciones en materia de seguridad. CE significa Conformité Européenne (Conformidad Europea) y se encuentra principalmente en equipos electrónicos, equipos de seguridad, productos de construcción y dispositivos médicos.



La marca UKCA garantiza que el uso seguro de un producto y que este cumple con todas las precauciones en materia de seguridad de acuerdo con los estándares de productos y la legislación del Reino Unido.



El producto no contiene látex.



El control de olores es un factor crítico que garantiza la discreción del usuario. Los productos para la incontinencia de ABENA están diseñados y fabricados para garantizar que el producto genere un olor mínimo.



El indicador de humedad es una tira sensible a los líquidos que cambia de color o se desvanece indicando cuándo es el momento de cambiar el producto.



El producto está equipado con barreras para evitar fugas.

