

## Silla de ruedas Mass Plus

Código: G909B46INTII



|       |    |    |      |    |      |    |    |     |    |     |            |
|-------|----|----|------|----|------|----|----|-----|----|-----|------------|
|       |    |    |      |    |      |    |    |     |    |     |            |
| 105.5 | 65 | 95 | 26.5 | 46 | 40.6 | 44 | 50 | 120 | 8" | 24" | 85x28x97.5 |

### Descripción:

Silla de ruedas multifuncional adaptable y ajustable que brinda un soporte integral a usuarios que requieran asistencia en movilidad y/o desplazamiento.

Cuenta con diferentes configuraciones para una personalización efectiva.

## A) Características

- Silla de ruedas versátil, robusta y liviana (peso 19.5 kg.) Incluye tapiz de tela Oxford (con sistema antiplama), pintura electroestática al polvo, apoya brazos bi-direccionales (ambos se cruzan a posterior) que permiten una mejor transferencia del usuario y/o paciente de hasta 120 kg.
- El sistema de plegado reposabrazos, reposapiés y piernas disponen de un medio para fijarlos de manera segura en cualquier posición prevista. Aquellas piezas que son regulables sus incrementos no exceden los 2,5 centímetros.



**Estructura y Cruceta**  
Acero de alta resistencia con dos crucetas, el tubo de crucetas es de 25,4 mm



**Respaldo**  
Incluye bolsillo porta objetos/herramientas




**Tapiz de Asiento**  
Tela oxford acolchada, impermeable, lavable, antitranspirante, desinfectable (\*), antiplama y desmontable con broches cubiertos  
Ancho 46 cm y fondo 40,6 cm



**Bastones de Empuje**  
Bastones fijos para empuje con manillas ergonómicas de plástico de alta densidad antideslizantes



**Frenos**  
Bi laterales y regulables horizontalmente (modo paciente amputado)

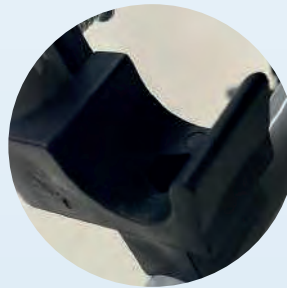

**Pieza en H**



**Plegado**  
Incluye mecanismo de plegado fácil y rápido, reduciendo espacio de almacenamiento



**Sistema de guía**  
Para un plegado fácil y seguro

(\*) desinfectable La tela es desinfectable

1. Cuando utilice un desinfectante que contenga cloro, puede remojar la tela Oxford en una solución de cloro eficaz de 500 mg/L para garantizar que el desinfectante pueda cubrir completamente la superficie de la tela Oxford.
2. Cuando utilice desinfectante con etanol, puede rociarlo uniformemente sobre la superficie de la tela Oxford y luego frotarlo durante 1 minuto.



**Horquilla de aluminio**  
Posee 3 regulaciones de altura



**Ruedas delanteras**  
Rueda maciza de 8"x2"




**Sistema de liberación**  
Ruedas traseras con sistema de liberación rápida/ quick release



**Antivuelcos**  
Desmontables y ajustables




**Ruedas traseras macizas de PU** de alta resistencia, con aro de propulsión y llanta de 24" con un ancho de 1" 3/8

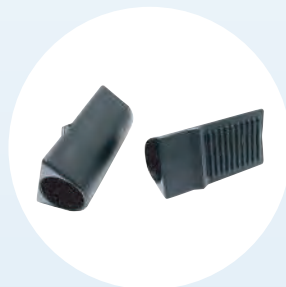

**Accesorio complementario para antivuelco**



**Set de herramientas**  
Incluye set de herramientas

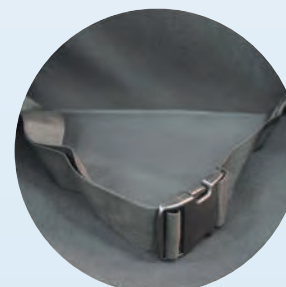

**Cinturón de seguridad**  
Cinturón de seguridad pelvico desmontable



**Manual de uso**  
Incluye manual e instrucciones de uso en español



#### Apoyapiés

Apoyapiés ajustable en 6 posiciones con sistema botón click abatible en dos hojas



#### Seguridad

Protector de pantorrillas para evitar deslizamientos hacia atrás



#### Pierneras

Batientes y desmontables

### Apoyabrazos


- Apoyabrazos acolchado de altura desde 26 a 34 cm (el largo del apoyabrazos es de 35 cm). Posee protector lateral en ambos costados para seguridad del usuario.



#### Sistema 1 Abatible y plegado al respaldo



Presionar la pinza de seguridad para liberar apoyabrazos

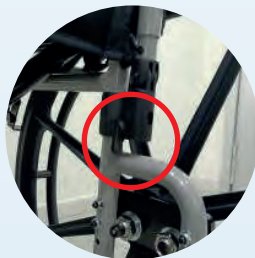

Mecanismo de seguridad, posición hacia abajo cerrado



Abatir el apoyabrazos según indica la flecha




Plegar en la posterior

#### Sistema 2 Desmontaje rápido



Presionar la pinza de seguridad para liberar apoyabrazos

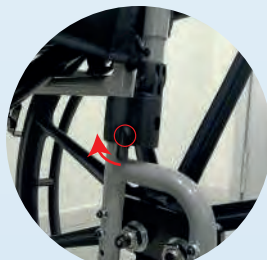

Girar el mecanismo de seguridad hacia arriba para liberación rápida




Desmontar el apoyabrazos




Para volver a la posición original, ensamblar el codo de rotación según imagen, girarlo en el sentido de la posición del apoyabrazos

## Sistema de ajustes (pletina de ajustes)

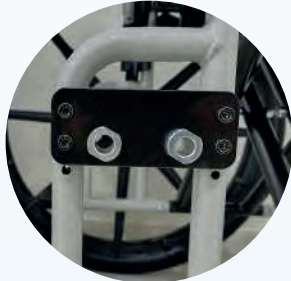


**Sistema de ajustes**  
Sistema ajustable en dirección horizontal en dos posiciones cambiando centro de gravedad (estándar y amputados). A su vez ajustable en tres posiciones en la vertical

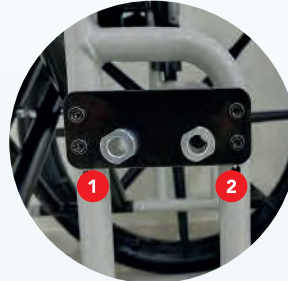

**Ajuste centro de gravedad (ajuste horizontal)**  
**Tubo izquierdo (amputado) 1** recordar desplazar freno para ajuste de rueda en nueva posición.  
**Tubo derecho (estándar) 2**

## Ajuste de Altura

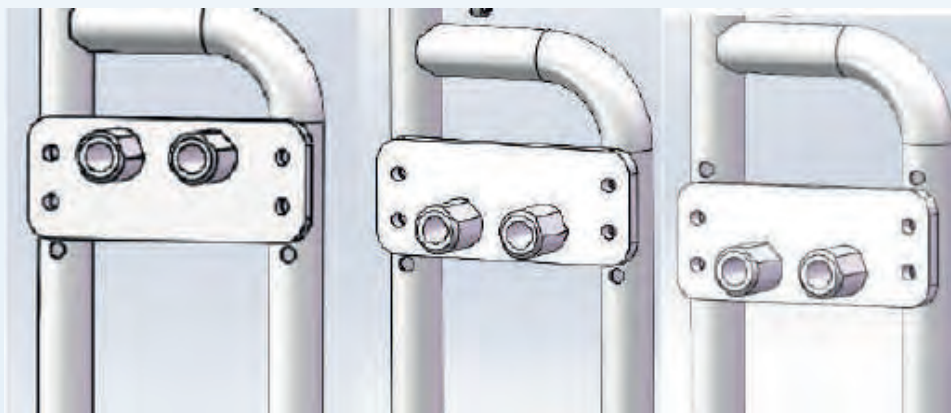

Altura 1

Altura 2  
(Invertir placa)

Altura 3

### Ajuste de Altura en Pletina

## B) Mantenimiento y cuidado

Se sugiere revisar su silla de ruedas cada 6 meses. Puede realizar la manutención solo o con ayuda de otras personas.

- Quite el polvo de todas las superficies y mecanismos.
- Aceite el mecanismo de las palancas de freno, elementos móviles de enclavamiento.
- Revise que todas las uniones atornilladas estén fijas.

### C) Precauciones

- No deje la silla de ruedas bajo la luz solar o cerca de fuentes de calor como estufas chimeneas u otros.
- Utilice solo un paño húmedo para la limpieza de su silla. No utilice productos abrasivos, revise periódicamente las ruedas y frenos, con el fin de evitar accidentes.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- Esta silla no puede apilarse. Respete el peso máximo establecido.
- La personalización en la configuración de este producto debe ser realizada por un médico o profesional de salud tratante.

### D) Garantía

Nuestra Silla de Ruedas Estándar cuenta con una garantía de 5 años y cubre todas las fallas y defectos que se demuestre que son atribuibles a una fabricación defectuosa. La garantía no cubre el desgaste por el uso normal, las consecuencias de un manejo inadecuado o daños, mantenimiento deficiente y puesta en marcha o montaje incorrecto por parte del comprador o de un tercero o fallas atribuibles a circunstancias ajenas a nuestro control. Las piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía. La garantía se anulará si se realizan modificaciones en el producto que no estén autorizadas y no las efectúe el distribuidor especialista o se utilicen accesorios o recambios inadecuados. La garantía no cubre los costos derivados de la subsanación de defectos, como los gastos de transporte y desplazamiento, costos laborales, etc.

### E) Vida Útil

La vida útil prevista es de 5 años, siempre y cuando el producto se utilice diariamente y conforme a las instrucciones de seguridad y las instrucciones de mantenimiento, y se respete el uso previsto, tal y como se indica en el presente documento.

### F) Marca

Mass by Global Healthcare.

### G) País de Origen

China.

### H) Cumplimiento Norma 226, ISO 13485, ISO 9001

|  | Packaging         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                                                                       | Alto              | : 85 cm   |
|                                                                                       | Ancho             | : 28 cm   |
|                                                                                       | Largo             | : 97.5 cm |
|                                                                                       | Peso total:       | 21.5 kg   |
|                                                                                       | Empaque :1 unidad |           |