



Número de artículo 1999915798



**Pañales, ABENA Slip, XXL2, blanco, Código de color púrpura, Premium**

- ✓ Lámina trasera transpirable para un equilibrio saludable de la piel
- ✓ Tecnología Top-Dry para superficies secas para proteger la piel
- ✓ Paneles laterales flexibles para un ajuste fácil y óptimo
- ✓ Barreras de fugas para protección adicional
- ✓ Indicador de humedad
- ✓ Control de olores



**Descripción del producto**

ABENA Slip Bariatric es nuestro pañal para proteger la vejiga en casos de incontinencia moderada a intensa. Se ha diseñado para personas con un tamaño de cadera de hasta 254 cm. Los paneles laterales flexibles con cintas de velcro garantizan un ajuste fácil y óptimo. Los productos son totalmente transpirables y cuentan con la tecnología Top-Dry para una comodidad óptima que garantiza una respiración completa de la piel. También están equipados con barreras antifugas verticales para mayor protección. El sistema de control de olores minimiza los olores desagradables. El indicador de humedad guía al usuario y al cuidador hacia el producto con el nivel de absorción adecuado y ayuda a los cambios de producto.



Nombre de base	Pañales
Marca	ABENA
Submarca	Slip
Tamaño	XXL2
Color	Blanco
Características	Código de color púrpura
Material	Celulosa ECF, PE, lámina posterior similar al textil (TBS), elastano, material no tejido, PP, resina, SAP
Longitud/profundidad	1030 mm
Anchura	750 mm
Tamaño de la cadera	170-254
Tolerancia	+/- 10%
Absorción Rothwell	3200 ml
Género	Unisex
Nivel de calidad	Premium
Certificaciones	CE. MD. UKCA.
Clase CE	Class I
Estándares de producto o prueba	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Directivas, normativas y leyes	MDR (EU) 2017/745
BolsanúmeroPZN	18779923
CajanúmeroPZN	18779946
Instrucciones de seguridad y advertencias	Mantener fuera del alcance de los niños
Vida útil	5 años
Instrucciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar seco, a temperatura ambiente y sin luz solar directa.
Instrucciones de eliminación del producto	Puede eliminarse con la basura doméstica normal, clasificada según las normativas locales.

**Instrucciones de eliminación de embalaje**

Puede reciclarse o incinerarse.

**Instrucciones de uso/aplicación**

Pañales para proteger la vejiga en casos de incontinencia moderada a intensa. Es importante medir siempre la circunferencia de la cadera para seleccionar la talla adecuada y elegir el nivel de absorción correcto para evitar fugas. Pliegue el empapador en sentido longitudinal con la lámina exterior hacia fuera para que adquiera su forma cóncava. Pase el pañal entre las piernas de delante hacia atrás. Despliegue la parte delantera del pañal, creando un canal entre las piernas. Fije las cintas de velcro en ambos lados para un ajuste seguro y cómodo. Fácil reconocimiento del tamaño del producto mediante códigos de colores, nombres y sistemas de numeración.

**MD** El Reglamento (UE) 2017/745 es un reglamento de la Unión Europea sobre la investigación clínica y venta de productos sanitarios para uso humano. Deroga la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios, y la Directiva 90/385/CEE, relativa a los productos sanitarios implantables activos, con fecha del 26 de mayo de 2021.

**CE** El mercado CE garantiza el uso seguro de un producto y que este cumple con todas las precauciones en materia de seguridad. CE significa Conformité Européenne (Conformidad Europea) y se encuentra principalmente en equipos electrónicos, equipos de seguridad, productos de construcción y dispositivos médicos.

**UKCA** La marca UKCA garantiza que el uso seguro de un producto y que este cumple con todas las precauciones en materia de seguridad de acuerdo con los estándares de productos y la legislación del Reino Unido.

**FLEXIBLE SIDE PANELS**  
Panales laterales flexibles con elásticos añadidos para una fácil aplicación. Un ajuste cómodo y seguro que se adapta a todo tipo de cuerpos.

**ODOR CONTROL**  
El control de olores es un factor crítico que garantiza la discreción del usuario. Los productos para la incontinencia de ABENA están diseñados y fabricados para garantizar que el producto genere un olor mínimo.

**PROTECTIVE LEAKAGE BARRIERS**  
Las barreras eficaces frente a fugas, tanto visibles como invisibles, y los elásticos sin látex garantizan un ajuste perfecto, lo que reduce el riesgo de fugas.

**WETNESS INDICATOR**  
El indicador de humedad es una tira sensible a los líquidos que cambia de color o se desvanece indicando cuándo es el momento de cambiar el producto.

**SKIN BALANCED TOP-DRY PROTECTION**  
Una combinación con 100 % de transpirabilidad, el sistema Top-Dry y la protección frente a fugas proporciona una superficie seca y una piel sana incluso después de múltiples micciones, manteniendo el equilibrio natural del pH de la piel.

**LATEX**  
El producto no contiene látex.

**9 DROPS**  
Sistema de gotas que indica la absorción. Cuantas más gotas, mayor será la absorción. Varía de 1 a 9 gotas.

**TOP-DRY TECHNOLOGY**  
La tecnología del sistema Top-Dry único que proporciona una rápida absorción y asegura una superficie seca incluso después de orinar repetidamente.

**30% POST-CONSUMER RECYCLED FIBER**  
La bolsa es un 30 % PCR, lo que significa que está hecha a partir de materiales plásticos utilizados por consumidores. Esto nos permitirá reducir nuestros residuos plásticos y ayudar a cuidar el medio ambiente.

**100% BREATHABLE MATERIAL**  
El producto es totalmente transpirable para la comodidad del usuario; incluso durante un uso prolongado. Ayuda a mantener la integridad de la piel.

