

Bastón de paseo y/o punto de apoyo

Modelo: G-930L

Variación Código	Regatones extra
G-930LR1	1 regatón adicional



PESO
MÁXIMO
USUARIO

110
kilos



PESO
PRODUCTO

300
gramos

Descripción

Bastón de paseo, diseñado para brindar soporte a pacientes y/o usuarios que requieran asistencia en movilidad y/o desplazamiento.


Nota

Producto nuevo no refaccionado



A) Especificaciones Técnicas

- Bastón diseñado como punto de apoyo y ayuda al caminar. Su estructura sólida permite un soporte estable y confiable en la marcha. Su amplio rango de regulación de altura lo hace versátil para distintas estaturas de usuario.
- 10 posiciones de ajuste.
- Con sistema de altura regulable y un medio de fijación seguro en cualquier posición prevista.
- Manipulable sin uso de herramientas.
- La Talla mínima y máxima del usuario previsto para el uso de este producto corresponde a Talla M - L y el ajuste debe ser realizado por un profesional de la salud
- Sistema de regulación de altura
- Se dispone de un medio de fijación seguro en cualquier posición prevista.
- Es posible regular en incrementos que no excedan los 2,5 centímetros.
- Es manipulable sin uso de herramientas.

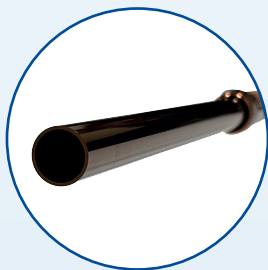

Estructura

Tubular de aluminio anodizado, color cobre



Empuñadura

Fija , ergonómica y antideslizante




Regatón

Goma dura antideslizante



Regatón

Incluye anillo metálico interior de refuerzo

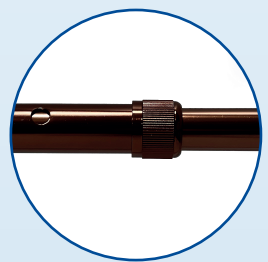

Anillo de seguridad

Regulación de altura



Packaging

Alto : 28 cm
Ancho : 15 cm
Largo : 65 cm
Peso total: 8.6 kg
Empaque : 20 unidades/caja



B) Medidas



- Altura mínima 71 cm.
- Altura máxima 94 cm.
- 10 posiciones de ajustes.
- Medido desde el suelo a la zona media del borde superior de la empuñadura.
- Se considera la fijación en el primero y el último punto de fijación.

C) Precauciones y Cuidados

- Revise las alfombras que no tengan bordes doblados o estén sueltas, con las cuales pueda tropezar.
- Se deben mantener los pisos secos y limpios.
- Prefiera calzado con suelas antideslizantes, evite usar zapatos con suelas de cuero y zapatos con taco.
- Revise permanentemente la goma o regatón que tiene su bastón, si está desgastado debe reemplazar esa pieza.
- Evite llevar bolsas de mano ya que representa un riesgo para la estabilidad y equilibrio.
- Este bastón debe ser guardado en un lugar seco.



D) Instrucciones de Uso

1. Los bastones de aluminio se ajustan presionando un botón y deslizando el tubo a la nueva longitud hasta que el botón quede fijo en el punto deseado.
2. Las puntas de goma antideslizantes permiten evitar los resbalones o caídas.
3. Cuando se indica solo el uso de un bastón debe ser utilizado en el lado contralateral de la disfunción.
4. La empuñadura debe estar a la altura de la articulación de cadera (trocanter mayor).
5. El codo de la extremidad que toma el bastón debe quedar en ángulo de 30°.
6. Ponga todo el peso en la pierna indemne y luego mueva el bastón, avanzando a una distancia adecuada con la pierna contralateral.
7. Con el peso distribuido entre el bastón y la pierna con disfunción, avance con la pierna contralateral.
8. Apoye el bastón firmemente en el suelo antes de dar un paso. No coloque el bastón demasiado adelante de usted ya que este podría resbalarse.

Recomendaciones Para Subir o Bajar Peldaños

Si hay una baranda, sosténgase de este y use su bastón en la otra mano

Para subir:

- Dé el paso primero con su pierna indemne.
- Ponga su peso sobre la pierna indemne y suba el bastón y la pierna contralateral.
- Use el bastón para ayudarse con el equilibrio.

Para bajar:

- Ubique su bastón en la parte de abajo del peldaño.
- Baje su pierna con disfunción. Use el bastón para tener equilibrio y apoyo.
- Baje su pierna indemne al lado de su pierna contralateral.



E) Garantía

Cuenta con una garantía de 5 años y cubre todas las fallas y defectos que se demuestre que son atribuibles a una fabricación defectuosa. La garantía no cubre el desgaste por el uso normal, las consecuencias de un manejo inadecuado o daños, mantenimiento deficiente y puesta en marcha o montaje incorrecto por parte del comprador o de un tercero o fallas atribuibles a circunstancias ajenas a nuestro control. Las piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía. La garantía se anulará si se realizan modificaciones en el producto que no estén autorizadas y no las efectúe el distribuidor especialista o se utilicen accesorios o recambios inadecuados. La garantía no cubre los costos derivados de la subsanación de defectos, como los gastos de transporte y desplazamiento, costos laborales, etc

F) Vida Útil

La vida útil prevista es de 5 años, siempre y cuando el producto se utilice diariamente y conforme a las instrucciones de seguridad y las instrucciones de mantenimiento, y se respete el uso previsto, tal y como se indica en el presente documento

G) Origen


Producto fabricado en China

H) Marca

Mass[®] by Global Healthcare[®]

I) Certificaciones y Normativas

ISO 13485 e ISO 9001

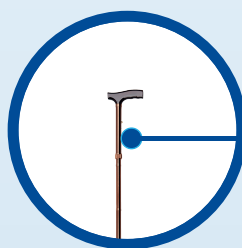

**Cumplimiento
Norma N°226**

	Fecha de Fab.:
	Fecha Vencimiento:
	N° Lote:
	N° de serie: